



**Masque de protection respiratoire 3 plis à usage unique**  
**Qualité chirurgicale – Emballage stérile individuel**  
**La boîte de 50**

Qualité chirurgicale équivalent à la norme européenne CE Directive Standard EN 149:2001+A1:2009

**COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?**



**Avant de mettre ou enlever le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.**



**Pour le mettre :**

- Tenez le masque par les lanières élastiques.
- Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.



**Pour l'enlever :**

Décrochez les lanières élastiques pour décoller le masque de votre visage.



**Il faut changer le masque :**

- Quand vous avez porté le masque 4h.
- Quand vous souhaitez boire ou manger.
- Si le masque s'humidifie.
- Si le masque est endommagé.



Évitez de le toucher et de le déplacer.



Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.



Ne mettez pas le masque dans votre poche ou votre sac après l'avoir porté. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.



Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.



Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.



**ATTENTION : Ce masque ne remplace pas les gestes barrières.**

Il ajoute une barrière physique, lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les



Respecter une distance de 1 mètre

**LES BONS GESTES FACE AU CORONAVIRUS : OÙ JETER LES MASQUES, MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?**

COVID-19



Ces déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d'un système de fermeture fonctionnel.



Lorsqu'il est rempli, ce sac doit être soigneusement refermé, puis conservé 24 heures.



Après 24 heures, ce sac doit être jeté dans le sac poubelle pour ordures ménagères.



Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle des déchets recyclables ou poubelle «jaune» (emballages, papiers, cartons, plastiques).

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](http://GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS) 0 800 130 000



**Fabrication**

Hemei (Hangzhou) Daily Chemical co, Ltd  
No.9, Mingshen Road, Fenshui Town,  
Tonglu County, Hangzhou  
City, Zhejiang Province, China  
Lots : 0571-64199168 / 0571-64199111

**Stockage**

-5 °C - 50°C

**Distribution**

ESAT MOULINS - ANDIKADO / UNAPEI PAYS  
DE L'ALLIER - 89 rue de Paris 03000 MOULINS  
France SIRET : 842 512 865 00218 /  
Code APE : 8810C / TVA : FR1K842512865  
Email contact @andikado.com  
Tél. 03 86 70 06 70  
du lundi au vendredi 9h-17h